

Предстерилизационная очистка

Процессы при проведении очистки	Режим очистки		Применяемое оборудование
	Начальная температура раствора (градус С)	Время выдержки, мин.	
1. Замачивание в растворе моющего комплекса при полном погружении изделия (Состав моющего комплекса: 20 мл 30-33% пергидроля, 5 гр моющего средства, 975 мл воды.)	50	15	Бачок, ванна, раковина
2. Мойка каждого изделия в растворе моющего средства при помощи ерша или ватно-марлевого тампона		0,5	
3. Ополаскивание проточной питьевой водой после применения моющего средства: натрий двууглекислый, Лотос или другие моющие средства.		10	
4. Ополаскивание под проточной водой		0,5	
5. Ополаскивание дистиллированной водой.			Бачок, ванна
6. Сушка горячим воздухом	85	До полного исчезновения влаги	Сушильный шкаф

Примечание:

1. Температура раствора в процессе мойки не поддерживается.

Моющий раствор можно использовать в течение суток для нескольких циклов мойки изделий с предварительным подогревом до появления слабо-розового окрашивания